



**MODALITA' D' INVIO DEI CAMPIONI PER TEST
NEUROIMMUNOLOGICI**

**IRCCS ISNB
Mod.02.P.8.5 LabNM3**

Materiale da inviare

Siero: quantità minima 1 ml, possibilmente in provetta con tappo a vite.

Liquor: quantità minima 1 ml, in provetta con tappo a vite.

NB. Se liquor disponibile, inviare sempre campioni di siero e liquor appaiati.

Se non è possibile inviare il siero, può essere inviato sangue intero, raccolto in 2 provette da siero (tappo rosso), conservato a +2/+8 °C ed inviato entro 48 ore al prelievo.

Per maggiori dettagli contattare il personale del laboratorio.

Modalità di raccolta e conservazione dei campioni

• Siero

1. raccogliere il sangue (almeno 5cc) in provette per siero con gel separatore;
2. centrifugare a circa 250 rcf (1600 rpm in una centrifuga standard) per 10 minuti;
3. raccogliere il siero e se possibile fare 2 aliquote, in provette da congelamento;

• Liquor

1. raccogliere il liquor in una provetta sterile;
2. se possibile trasferirlo in provette da congelamento (almeno 1 cc, possibilmente suddiviso in 2 aliquote);



- se possibile congelare i campioni di siero/liquor a -20°C, o meglio a -80°C;
- altrimenti i campioni possono essere conservati a temperatura ambiente per massimo 8 ore;
- per periodi compresi tra 8 e 72 ore, conservare a +2/+8°C;
- oltre le 72 ore i campioni devono essere congelati a -20/-80°C

NB Non congelare il sangue intero

Modalità di trasporto

Inviare i campioni tramite fattorino/corriere.

Trasporto:

- temperatura ambiente se la consegna avviene entro 48 ore dal prelievo;
- in contenitore refrigerato (i.e. con siberino) se durata di conservazione/trasporto tra 48 e 72 ore;
- possibilmente in ghiaccio secco se campioni congelati o se tempistiche di consegna superiori alle 72 ore.



**MODALITA' D' INVIO DEI CAMPIONI PER TEST
NEUROIMMUNOLOGICI**

**IRCCS ISNB
Mod.02.P.8.5 LabNM3**

Documenti di accompagnamento

1. Modulo Richiesta Analisi (Mod.01.P.8.5 LabNM)
2. Consenso al trattamento dei dati genetici e dei campioni biologici
3. Breve relazione clinica
4. Autorizzazione della Direzione Sanitaria (*per i pazienti in regime di ricovero nelle Unità Operative esterne all'AUSL di Bologna*)

La modulistica è reperibile alla pagina web del laboratorio, all'indirizzo
<https://www.ausl.bologna.it/istituto-delle-scienze-neurologiche/assistenza/laboratori/laboratorio-di-patologia-neuromuscolare>

IMPORTANTE: i campioni che non saranno accompagnati dalla documentazione sopra indicata, o con documentazione incompleta, saranno considerati **NON CONFORMI**

ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 16.00



Per consegne fuori orario o durante i festivi contattare telefonicamente o via e-mail il laboratorio per concordare la spedizione.

Indirizzo a cui spedire/consegnare i campioni:

Laboratorio di Patologia Neuromuscolare e Neuroimmunologia
Attenzione Dott.ssa Giannoccaro / Dott.ssa Ricciardiello
IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Ospedale Bellaria, Padiglione G, 1° piano
Via Altura 1/8, 40139 Bologna

MODALITA' DI REFERTAZIONE

I referti verranno inviati a mezzo posta (interna per i presidi ospedalieri AUSLBO) o PEC all'indirizzo specificato nel Mod.01.P.8.5 LabNM.

CONTATTI

Dott.ssa Maria Pia Giannoccaro	e-mail: mariapia.giannoccaro@ausl.bologna.it
Dott.ssa Fortuna Ricciardiello	tel.051 4966202
	e-mail: fortuna.ricciardiello@ausl.bologna.it