

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CATALOGO DELLE PRESTAZIONI

(ordinato per nome esame)

Laboratorio Unico Metropolitan (LUM)

NOME ESAME	CODICE	MATERIALE	CONTENITORE	NOTE	RICHIEDIBILE IN URGENZA IN TUTTE LE SEDI LUM
17 IDROSSIPROGESTERONE	17OHP	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815		
ACICLOVIR	ACICL	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ACIDI BILIARI TOTALI	ACIBITO	Siero	Bianco REF 362077		
ACIDO 5 IDROSSINDOLACETICO	5OH	Urina 24 ore + Acido cloridrico	Giallo REF 455007 + BIANCO	Prima di iniziare la raccolta di urine delle 24 ore versare nel contenitore di raccolta 25 mL di acido cloridrico 25%. Indicare diuresi delle 24 ore.	
ACIDO CITRICO LIQUIDO SEMINALE	ACITLS	Liquido seminale	Contenitore per LS REF BSC 740 BIOSIGMA	Solo presso PP Palagi AOSP, prenotabile CUP o a pagamento. Richiedere anche FRUTLS, SPERMA e VITALS. Si consiglia il prelievo per masturbazione dopo astinenza sessuale di 3 - 5 giorni. Consegnare il campione entro 1 h dal prelievo	
ACIDO CITRICO	CITRU	Urina 24 ore	Giallo REF 455007	Indicare diuresi	

Revisione del 14 APRILE 2026

AZIENDA USL di BOLOGNA
LUM - LABORATORIO UNICO METROPOLITANO
DIRETTORE
Dott.ssa Rita Mancini

ACIDO FOLICO	FOL	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
ACIDO LATTICO	LAT	Plasma	Grigio 4 mL antiglicolitico REF 368921	Evitare la stasi venosa. Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare il campione in portaprovette refrigerato	
ACIDO OMOVANILICO	ACIOMO	Urina 24 ore + Acido cloridrico	Giallo REF 455007 + BIANCO	Prima di iniziare la raccolta di urine delle 24 ore versare nel contenitore di raccolta 25 mL di acido cloridrico 25%. Indicare diuresi delle 24 ore.	
ACIDO PIRUVICO	PIRUV	Sangue in toto	Grigio 4 mL antiglicolitico REF 368921	Evitare la stasi venosa. Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare il campione in portaprovette refrigerato	
ACIDO URICO	URIC	Siero	Bianco REF 362077		
ACIDO URICO URINA	URICU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
ACIDO VALPROICO	VALP	Siero	Bianco REF 362077	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ACIDO VANILMANDELICO	VMA	Urina 24 ore + Acido cloridrico	Giallo REF 455007 + BIANCO	Prima di iniziare la raccolta di urine delle 24 ore versare nel contenitore di raccolta 25 mL di acido cloridrico 25%. Indicare diuresi delle 24 ore.	
ACTH - ORM. CORTICOTROPO	ACTH	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Inviare il campione in porta provette refrigerato	
ADAMTS13 ATTIVITA'	ADAMTS	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
ADALIMUMAB	ADA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ALBUMINA	ALB	Siero	Bianco REF 362077		
ALBUMINA URINA	MIALBU	Urina del mattino	Bianco REF 456085		

ALBUMINA GLICATA Gly AI %	HBALB	Siero	Bianco REF 362077	
ALCOOL (TEST DI SCREENING)	ALCO	Plasma	Grigio 4 mL antiglicolitico REF 368921	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo
ALDOSTERONE CLINO	ALDOC	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Prelievo in clinostatismo = posizione supina per almeno 30 min. Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo
ALDOSTERONE ORTO	ALDOO	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Prelievo in ortostatismo = posizione eretta da 30 min. (fermi o in cammino). Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo
ALDOSTERONE	ALDO	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo
ALDOSTERONE URINA	ALDOU	Urina 24 ore	Giallo REF 455007	Indicare diuresi
ALFA 2 ANTIPLASMINA (Attività)	APL	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo . Solo per percorsi specialistici
ALFA1 ANTITRIPSINA	ALFATRI	Siero	Bianco REF 362077	
ALFA1 FETOPROTEINA - AFP	AFP	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.
ALFA1 FETOPROTEINA SU LIQUIDO AMNIOTICO	AFPAMN	Liquido amniotico	Verde 6 mL NO GEL REF 368886	
ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA	A1G	Siero	Bianco REF 362077	
ALFA1 MICROGLOBULINA	GLOBUR	Urina del mattino	Giallo REF 455007	
ALFA2 MACROGLOBULINA	MACRO	Siero	Giallo REF 367955	

ALLUMINIO	ALLU	Siero	Tappo blu riga rossa REF 368380	Solo per percorsi specialistici interni (dialisi)	
ALLUMINIO URINA	UALLU	urina	Tappo Bianco REF 456085	Solo per percorsi specialistici interni (dialisi)	
ALOPERIDOLO	ALOP	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ALT (GPT)	ALT	Siero	Bianco REF 362077	In caso di terapia con sulfasalazina sono possibili interferenze con risultato falsamente sottostimato.	SI
ALVEOLITI IGG SPECIFICHE	ALVEOLITI	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
AMFETAMINE SU URINA	ANFE	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
AMICACINA	AMICA	Siero	Bianco REF 362077	Valle: eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco. Picco: eseguire prelievo dopo 30 - 60 minuti dal termine di un'infusione di almeno 30 minuti	
AMILASI LIQUIDO DA CAVITÀ	AMILALI	Liquido addominale	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
AMILASI PANCREATICA	AMIPA	Siero	Bianco REF 362077		
AMILASI SU LIQUIDO CISTI PANCREATICA	AMI106	Liquido da cisti pancreatica	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
AMILASI TOTALE	AMILA	Siero	Bianco REF 362077		
AMILASI URINA	AMILAU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
AMMONIO	AMM	Plasma	Lilla 3 ml EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare il campione in portaprovette in ghiaccio.	SI

AMPICILLINA	AMPI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
AMPRENAVIR	AMPRE	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ANALISI MUTAZIONE FATTORE II	DNAFII	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
ANALISI MUTAZIONE FATTORE V LEIDEN	DNAFV	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
ANGIOTENSINA ENZIMA CONVERTITORE	ACE	Siero	Bianco REF 362077		
ANTICOAGULANS LUPUS-LIKE (LAC)	LAC	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
ANTICORPI ANTI ACQUAPORINA 4	AQP4	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI ACQUAPORINA 4 LIQUOR	AQP4L	Liquor	Contenitore pulito, no GEL, no ANTICOAGULANTE		
ANTICORPI ANTI ADALIMUMAB	AADA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI BETA2 GLICOPROTEINA 1	GLICO	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA	CARDIO	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE	PCA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI CELLULE STEROIDEE OVAIO	OVAIO	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		

ANTICORPI ANTI CITRULLINA IGG	CCP	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI COCLEA	ABCOC	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI CUTE	ASA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI DNA (ds)	DNA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI ENA/ANA (SCREENING)	ACENA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	Test di secondo livello da richiedere solo in caso di forte sospetto di malattia autoimmune sistemica con anticorpi anti-nucleari (ANA negativi)	
ANTICORPI ANTI ENA/ANA (IMMUNOBLOT)	ENA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	Test di terzo livello da richiedere esclusivamente nei casi di esito positivo del test ENA screening.	
ANTICORPI ANTI GAD	GAD	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI GBM	ABGBM	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI GHIANDOLA SURRENE	SURRENE	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA e IgG	AGA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	Solo per percorsi specialistici	
ANTICORPI ANTI GRANULOCITI - ANCA	ANCA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI INFLIXIMAB	AIFX	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREAS	ICA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		

Revisione del 14 APRILE 2026

AZIENDA USL di BOLOGNA
LUM - LABORATORIO UNICO METROPOLITANO
DIRETTORE
Dott.ssa Rita Mancini

ANTICORPI ANTI INSULINA	ACINSU	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI LKM	LKM	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE	ASAMB	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI MITOCONDRIO	AMA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI MOG	MOG	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI MUSCOLO CARDIACO	ACMA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO	ASMA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI MUSCOLO SCHELETRICO	ASTRMA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI MUSK	MUSK	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTICORPI ANTI NUCLEO (REFLEX)	ANAR	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	ANA Reflex: test di screening per anticorpi anti-nucleari (ANA). In caso di positività degli anticorpi anti-nucleari a titolo $\geq 1:160$ il laboratorio procederà agli opportuni approfondimenti (ENA, anti-dsDNA). In caso di positività citoplasmatica, il laboratorio procederà alla determinazione degli anticorpi anti-mitocondrio e anti-ENA a seconda del pattern riscontrato. Il test ANA Reflex non può essere richiesto contestualmente ai test di secondo livello (anti-ENA, anti-dsDNA e anti-mitocondrio). I test di secondo livello non verranno eseguiti in caso di esito negativo o di deboli positivi (titolo 1:160).	
ANTICORPI ANTI PF4	APF4	Siero	Bianco REF 362077	Compilare scheda anamnestica	

ANTICORPI ANTI RECETTORE ACETILCOLINA	ABACHR	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
ANTICORPI ANTI RECETTORE FOSFOLIPASI A2 (ANTI-PLA2R)	PLA2R	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	ABTSH	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968	
ANTICORPI ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE	ASCA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI ADESI (MAR TEST)	AASPLS	Liquido seminale	Contenitore per LS REF BSC 740 BIOSIGMA	Solo presso PP Palagi AOSP, prenotabile CUP o a pagamento. Si consiglia il prelievo per masturbazione dopo astinenza sessuale di 3 - 5 giorni. Consegnare il campione entro 1 h dal prelievo
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI LIBERI	ABSPER	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468	
ANTICORPI ANTI TG	ABTG	Siero	Bianco REF 362077	
ANTICORPI ANTI TG SU AGOASPIRATO TIROIDEO	ABTG21	Agoaspirato tiroideo	Verde 6 mL NO GEL REF 368886	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.
ANTICORPI ANTI TPO	TPO	Siero	Bianco REF 362077	
ANTICORPI ANTI TROMBOSPONDINA DI TIPO 1 (DOMINIO 7 A)	THSD7A	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
ANTICORPI anti HMGCR	HMGCR	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
ANTICORPI ANTI-IA2	IA2	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
ANTICORPI ANTI-ZnT8	ZNT8	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	

ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI - S	TRICIU	Siero	Bianco REF 362077		
ANTIFATTORE INTRINSECO IgG	FI	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ANTITROMBINA	AT3	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
ANTITROMBINA Ag	ATAG	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Solo per percorsi specialistici	
APIXABAN	API	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo. In esecuzione presso I e Urgenze previo accordo con il settore	
APOLIPOPROTEINA A1	APOA	Siero	Bianco REF 362077		
APOLIPOPROTEINA B	APOB	Siero	Bianco REF 362077		
APTOGLOBINA	APTO	Siero	Bianco REF 362077		
aPTT	PTT	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	SI
aPTT (correzione con plasma normale)	PTTC	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
ARIPIRAZOLO	ARIPI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
AST (GOT)	AST	Siero	Bianco REF 362077		SI
ATAZANAVIR	ATAZA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	

Revisione del 14 APRILE 2026

AZIENDA USL di BOLOGNA
 LUM - LABORATORIO UNICO METROPOLITANO
 DIRETTORE
 Dott.ssa Rita Mancini

BARBITURATI SIERO	BARBI	Siero	Bianco REF 362077	Eseguiti solo per percorsi in Urgenza.	
BARBITURATI SU URINA	BARBU	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
BENZODIAZEPINE SIERO	BENZO	Siero	Bianco REF 362077		
BENZODIAZEPINE SU URINA	BENZOU	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
BETA CROSS-LAPS	CLAPS	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		
BETA2 MICROGLOBULINA SIERO	BETA2	Siero	Bianco REF 362077		
BETA2 MICROGLOBULINA	BETA2UR	Urina del mattino	Giallo REF 455007		
BETA2 TRANSFERRINA	B2TRF	Siero e Raccolta liquido	Siero: Giallo REF 367955 Raccolta liquido: Contenitore sterile con tappo a vite color bianco/trasparente, no GEL, no ANTICOAGULANTE 5 mL Ref. 63.504027	Richiedibile come "profilo"	
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	BILTO	Siero	Bianco REF 362077		SI
BI-TEST	BITEST	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968	Solo nell'ambito del Percorso Nascita	
BRIVARACETAM	BRIVA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	

BUPRENORFINA	BUPRE	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
BURST TEST	BURST	Plasma	Verde 4 mL NO GEL eparina di NA REF 367869	SOLO SU CONSULENZA IMMUNOLOGICA Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico con il settore di esecuzione (051/3172726)	
C1 ESTERASI INIBITORE	C1EST	Siero	Giallo REF 367955		
C1 ESTERASI INIBITORE (METODO FUNZIONALE)	C1INH	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo. Inviare previo accordo con il settore di esecuzione (051/3172495)	
C3 COMPLEMENTO	C3	Siero	Bianco REF 362077		
C4 COMPLEMENTO	C4	Siero	Bianco REF 362077		
CA 125	CA125	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
CA 125 SU LIQUIDO ADDOMINALE	CA1257	Liquido addominale	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
CA 15-3	CA153	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
CA 19-9	CA199	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
CA 19-9 SU LIQUIDO ADDOMINALE	CA1997	Liquido addominale	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
CA 19-9 SU LIQUIDO CISTI PANCREATICA	CA199106	Liquido da cisti pancreatica	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
CA 21-1 - CYFRA	CYFRA	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		

CALCIO	CA	Siero	Bianco REF 362077		SI
CALCIO IONIZZATO	CAION	Sangue in toto	Verde 4 mL NO GEL eparina di NA REF 367869	Inviare il campione in portaprovette refrigerato. Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
CALCIO URINA	CAU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
CALCITONINA	CT	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468	Inviare il campione in portaprovette refrigerato	
CALCITONINA SU AGOASPIRATO TIROIDEO	CT21	Agoaspirato tiroideo	Verde 6 mL NO GEL REF 368886	Inviare il campione in portaprovette refrigerato	
CALCITONINA SU LIQUIDO DI LAVAGGIO	CT72	Liquido di lavaggio	Verde 6 mL NO GEL REF 368886	Inviare il campione in portaprovette refrigerato	
CALCOLI RENALI	CALREN		Contenitore pulito, no GEL, no ANTICOAGULANTE	Inviare materiale pulito ed asciutto	
CALPROTECTINA	CALP	Feci	Contenitore pulito		
CANNABINOIDI SU URINA	CANNA	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
CARBAMAZEPINA	CAZEPI	Siero	Bianco REF 362077	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
CARBOSSIEMOGLOBINA	CARBO	Sangue arterioso/venoso	Siringa eparinata	Agitare delicatamente dopo il prelievo	
CATECOLAMINE URINA	CATECOU	Urina 24 ore + Acido cloridrico	Giallo REF 455007 + BIANCO	Prima di iniziare la raccolta di urine delle 24 ore versare nel contenitore di raccolta 25 mL di acido cloridrico 25%. Indicare diuresi delle 24 ore.	
CATENE LEGGERE LIBERE	CATELE	Siero	Giallo REF 367955		

CATENE LEGGERE (PROTEINA DI BENCE-JONES)	CATUR	Urina del mattino	Giallo REF 455007		
CDT (TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE)	CDT	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
CEA	CEA	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
CEA SU LIQUIDO ADDOMINALE	CEA7	Liquido addominale	Contenitore pulito, no GEL, no ANTICOAGULANTE (es. tappo bianco anello nero REF 456085)		
CEA SU LIQUIDO CISTI PANCREATICA	CEA106	Liquido da cisti pancreatica	Contenitore pulito, no GEL, no ANTICOAGULANTE (es. tappo bianco anello nero REF 456085)		
CEA SU LIQUIDO PLEURICO	CEA9	Liquido pleurico	Contenitore pulito, no GEL, no ANTICOAGULANTE (es. tappo bianco anello nero REF 456085)		
CEFEPIME	CEFEP	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
CEFTAZIDIMA	CEFTA	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
CELIACHIA DEFICIT IgA - Anticorpi anti peptide deamidato della gliadina IgG (DGPG)	CELIDEFFUP	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
CELIACHIA DIAGNOSI REFLEX - Anticorpi anti transglutaminasi IgA (TRANSADR) - IgA REFLEX Immunoglobulina A (IGA REFLEX)	CELIREFLEX	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969 + Bianco REF 362077		
CELIACHIA FOLLOW UP - Anticorpi anti transglutaminasi IgA (TRANSADR)	CELIFUP	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
CERULOPLASMINA	CERU	Siero	Bianco REF 362077		

CICLOSPORINA	CICLO	Sangue in toto	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco. Eventuale 2° prelievo dopo 2 ore dall'assunzione	
CIPROFLOXACINA	CIPROF	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
CISTATINA C	CISC	Siero	Bianco REF 362077		
CLORO	CL	Siero	Bianco REF 362077		SI
CLORO URINA	CLU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
CLOZAPINA	CLOZA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
COBALTO	CO	Plasma	Blu metal free (K2-EDTA) 368381 REF	Eeguire il prelievo utilizzando un ago a farfalla, eliminando i primi ml di sangue. Nei pazienti con protesi d'anca MoM sottoposti a protocollo di sorveglianza, in caso di riscontro di una concentrazione superiore a 7 microg/L utilizzare per il prelievo successivo un ago cannula, eliminando i primi ml di sangue. RICHIEDIBILE SOLTANTO MEDIANTE PERCORSI INTERNI DEDICATI	
COCAINA METABOLITI SU URINA	COCA	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
COLESTEROLO HDL	HDL	Siero	Bianco REF 362077		
COLESTEROLO LDL	LDL	Siero	Bianco REF 362077		
COLESTEROLO TOTALE	COLETO	Siero	Bianco REF 362077		
CONTA PIASTRINE CON ANTICOAGULANTI DIFFERENZIATI	DPLT	Sangue in toto	Lilla 3 ml EDTA REF 364662 + Azzurro 3 ml REF 363048	Agitare delicatamente le provette dopo il prelievo	SI

COPEPTINA	COPE	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		
CORTISOLO POMERIDIANO	CORTPOM	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
CORTISOLO SALIVARE	CORTS	Saliva	Salivette	Istruzioni da ritirare in laboratorio	
CORTISOLO SIERO	CORT	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
CORTISOLO URINA	CORTU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Solo per percorsi specialistici	
CREATINCHINASI	CK	Siero	Bianco REF 362077		
CREATININA	CREA	Siero	Bianco REF 362077		SI
CREATININA CLEARANCE	CLCR	Sangue + Urina 24 ore	Bianco REF 362077 + REF 456085	Indicare diuresi	
CREATININA URINA	CREAU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
CRIOGLOBULINE	RCRI	Siero	Tappo rosso 10 mL (NO GEL) REF 367896	Inoltro in Crioplast (tenuto a 37 °C)	
CROMO	CR	Plasma	Blu metal free (K2-EDTA) REF 368381	Eseguire il prelievo utilizzando un ago a farfalla, eliminando i primi ml di sangue. Nei pazienti con protesi d'anca MoM sottoposti a protocollo di sorveglianza, in caso di riscontro di una concentrazione superiore a 7 microg/L utilizzare per il prelievo successivo un ago cannula, eliminando i primi ml di sangue. RICHIEDIBILE SOLTANTO MEDIANTE PERCORSI INTERNI DEDICATI	
CROMOGRANINA	CGA	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		

DABIGATRAN	DABI	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
DAPTOMICINA	DAPTO	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Valle: eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco. Picco: eseguire prelievo dopo 30 - 60 minuti dal termine di un'infusione di almeno 30 minuti	
DARUNAVIR	DARUN	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
D-DIMERO	DIMERO	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	SI
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	ANDRO	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		
DHEA SOLFATO	DHEAS	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
DIGOSSINA	DIGO	Siero	Bianco REF 362077	Eseguire prelievo da 8 a 24 ore dopo l'assunzione del farmaco. Si segnala inoltre che l'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
ECP (PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI)	ECP	Siero	Blu 3.5 ml REF 368966	Indicare l'ora effettiva del prelievo sull'etichetta. Capovolgere delicatamente la provetta per 5 volte e lasciarla in posizione verticale per 120 minuti. Inviare immediatamente al Laboratorio OM. Per prelievi non effettuati ad OM, dopo i 120 minuti, centrifugare a 2500 RPM (1000-1300 g), travasare il siero in una nuova provetta, rietichettare e inviare al laboratorio.	
ECSTASY	EXTA	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
EDOXABAN	EDO	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Seguire scrupolosamente le RACCOMANDAZIONI GENERALI .	
EFAVIRENZ	EFAVI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ELETTROFORESI	ELETTRO	Siero	Giallo REF 367955		

ELETTROFORESI SU LIQUIDO PLEURICO	ELETTRO9	Liquido pleurico	Contenitore pulito, no GEL, no ANTICOAGULANTE		
ELETTROFORESI	ELPROU	Urina 24 ore	Giallo REF 455007	Indicare diuresi	
EMA TEST	EMATEST	Sangue in toto	Nero REF 454245	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico con il settore di esecuzione (051/3172726)	
EMOCROMATOSI	CROMA	Sangue in toto	Lilla 6 ml EDTA REF 367864	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
EMOCROMO + FORMULA + PIASTRINE	EMO	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	SI
EMOGAS ARTERIOSA	GASAR	Sangue arterioso	Siringa eparinata		
EMOGAS COMPLETA PER NEONATOLOGIA	EGABIL	Sangue arterioso/venoso	Siringa eparinata		
EMOGAS COMPLETA	EGA	Sangue arterioso	Siringa eparinata		
EMOGAS VENOSA	GASVE	Sangue venoso	Siringa eparinata		
EMOGLOBINA A1C GLICATA	HBGL	Plasma	Lilla 6 ml EDTA REF 367864	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
EMOGLOBINA LIBERA	HBLIB	Sangue in toto	Giallo EDTA REF362073	Solo per percorsi specialistici	

EMOGLOBINE ANOMALE - Emoglobina A2 - Emoglobina Fetale - Varianti emoglobiniche	EMOPAT	Plasma	Lilla 6 ml EDTA REF 367864	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Richiedere insieme a Emocromo, Ferro, Transferrina e Ferritina	
ENCEFALITI - Anti recettore glutammato NMDAR - Anti CASPR2 - Anti recettore glutammato AMPA 1/2 - Anti GLI1 - Anti DPPX - Anti GABAb	ENCE	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ENCEFALITI LIQUOR - Anti recettore glutammato NMDAR - Anti CASPR2 - Anti GABAb	ENCEL	Liquor	Contenitore pulito, NO gel, NO anticoagulante		
EPARINA a basso peso molecolare LMWH (Anti-Xa)	EPAR	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo.	
EPARINA non frazionata UFH (Anti-Xa)	EPARUF	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo.	
EPATOPATIE AUTOIMMUNI (IMMUNOBLOT IGG)	EPA	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
ERITROPOIETINA	ERIPO	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
ESAME CITOCHIMICO LIQUOR	LIQ	Liquor	Contenitore sterile con tappo a vite color Bianco/trasparente, no GEL, no ANTICOAGULANTE 5 mL Ref. 63.504027		
ESAME CITOCHIMICO DEL LIQUIDO SINOVIALE	SINO	Liquido sinoviale	N. 2 provette Tappo Verde 6 mL NO GEL REF 368886		

ESAME COMPLETO URINE	URINA	Urina del mattino	Giallo REF 455007	Raccogliere il campione delle urine dopo il riposo notturno evitando attività fisica intensa e rapporti sessuali nella giornata precedente. Non raccogliere le urine durante il ciclo mestruale. Lavare accuratamente le mani ed i genitali esterni, scartare il primo getto di urina e raccogliere il successivo	
ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE	SPERMA	Liquido seminale	Contenitore per LS REF BSC 740 BIOSIGMA	Solo presso PP Palagi AOSP, prenotabile CUP o a pagamento. Si consiglia il prelievo per masturbazione dopo astinenza sessuale di 3 - 5 giorni. Consegnare il campione entro 1 h dal prelievo	
ESTRADIOLO HS	ESTR	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
ETAMBUTOLO	ETAMB	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ETILGLUCURONIDE	ETGU	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
ETOSUCCIMIDE	ETOSUC	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ETRAVIRINA	ETRAV	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
EVEROLIMUS	EVE	Sangue in toto	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FATTORE II	FATCO2	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FATTORE IX	FATCO9	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FATTORE REUMATOIDE	RF	Siero	Bianco REF 362077		
FATTORE V	FATCO5	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	

FATTORE VII	FATCO7	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FATTORE VIII	FATCO8	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FATTORE von WILLEBRAND (Antigene)	FVWAG	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA	
FATTORE von WILLEBRAND (Cofattore Ristocetina)	FVWRIC	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA	
FATTORE X	FATCO10	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FATTORE XI	FATCO11	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FATTORE XII	FATCO12	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FATTORE XIII	FATCO13	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA	
FELBAMATO	FELBA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FENILETIL MALONAMMIDE PEMA	PEMA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FENITOINA	FENI	Siero	Bianco REF 362077	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FENOBARBITAL	FENO	Siero	Bianco REF 362077	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FERRITINA	FERR	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	

FERRO	FE	Siero	Bianco REF 362077		
FIBRINOGENO	FIB	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	SI
FIBROBLASTIC GROWTH FACTOR 23 (FGF- 23)	FGF23I	Plasma	Lilla 3 ml EDTA REF 364662	Solo per richieste da Ambulatori di: Nefrologia, Endocrinologia Pagotto e Endocrinologia Pediatrica Cassio	
FIBROBLASTIC GROWTH FACTOR 23 (FGF- 23) FRAM. C TERMINALE	FGF23C	Plasma	Lilla 3 ml EDTA REF 364662	Solo per richieste da Ambulatori di: Nefrologia, Endocrinologia Pagotto e Endocrinologia Pediatrica Cassio	
FIBROSI CISTICA	FCISTICA	Sangue in toto	Lilla 6 ml EDTA REF 367864 + Verde 6 mL EPARINA REF 367869	Prenotabile CUP su PP OM o contattare Laboratorio (051/6478094)	
FLECAINIDE	FLEC	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FLUCITOSINA (5-FC)	5FLUCY	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FLUCONAZOLO	FLUC	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
FONDAPARINUX (Arixtra)	ARIX	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo .	
FOSFATASI ACIDA TARTRATO RESISTENTE ISOFORMA 5B (TRAP5B)	TRACP	Siero	Ruggine REF 368968	Solo per richieste da Ambulatori di: Nefrologia, Endocrinologia Pagotto e Endocrinologia Pediatrica Cassio	
FOSFATASI ALCALINA	ALP	Siero	Bianco REF 362077		
FOSFATASI ALCALINA OSSEA	ALPOS	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		
FOSFORO	P	Siero	Bianco REF 362077		

FOSFORO URINA	PU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
FRUTTOSAMINA	FRU	Siero	Bianco REF 362077		
FRUTTOSIO LIQUIDO SEMINALE	FRUTLS	Liquido seminale	Contenitore per LS REF BSC 740 BIOSIGMA	Solo presso PP Palagi AOSP, prenotabile CUP o a pagamento. Richiedere anche ACITLS e VITALS. Si consiglia il prelievo per masturbazione dopo astinenza sessuale di 3 - 5 giorni. Consegnare il campione entro 1 h dal prelievo	
FSH	FSH	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
FT3 - T3 LIBERO	FT3	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
FT4 - T4 LIBERO	FT4	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
GABAPENTIN	GABA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
GAMMA-GT	GGT	Siero	Bianco REF 362077		
GANCICLOVIR	GANCI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
GANGLIOSIDI IgG E IgM (immunoblot) - Anti-GM1 - Anti-GM2 - Anti-GM3 - Anti-GD1a - Anti-GD1b - Anti-GT1b - Anti-GQ1b	GANGLIO	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
GASTRINA	GASTRI	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		

GENTAMICINA	GENTA	Siero	Bianco REF 362077	Valle: eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco. Picco: eseguire prelievo dopo 30 - 60 minuti dal termine di un'infusione di almeno 30 minuti	
GH - SOMATOTROPO	HGH	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
GLUCOSIO	GLIC	Siero	Bianco REF 362077	In caso di terapia con sulfasalazina sono possibili interferenze con risultato falsamente sottostimato. In caso di terapia con sulfapiridina sono invece possibili interferenze con risultato falsamente sovrastimato.	SI
GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI	G6PDH	plasma	Rosa 4 mL REF 386164	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
GLUCOSIO POST PRANDIALE	GLICP	Plasma	Grigio 5 mL antiglicolitico REF 368201	Effettuare il prelievo 2 ore dopo il pasto	
GLUCOSIO URINA	GLICU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
HCG	HCG	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	SI
HEPATOQUICK	HQ	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo. Solo per percorsi specialistici	
HLA-B*5701 (B17) - TEST DI SCREENING	HLAB57	Sangue in toto	Nero REF 454245	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
IGA SALIVARI	IGAS	Saliva	provetta senza additivi/gel		
IGE TOTALI	IGET	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
IGF-1 (SOMATOMEDINA)	IGF1	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		
IGFBP-3	IGFBP	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		

IMMUNOCOMPLESSI C1Q IGG (EIA)	CIC	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
IMMUNOFISSAZIONE	FIS	Siero	Giallo REF 367955	
IMMUNOFISSAZIONE URINA	FISU	Urina del mattino	Giallo REF 455007	
IMMUNOGLOBULINE IGG IGA IGM	IMM	Siero	Bianco REF 362077	
INDINAVIR	INDIN	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco
INFLIXIMAB	IFX	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
INIBINA B	INIB	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	
INIBITORE FATTORE IX	INF9	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA
INIBITORE FATTORE V	INF5	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA
INIBITORE FATTORE VII	INF7	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA
INIBITORE FATTORE VIII UMANO	INF8UM	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA
INIBITORE FATTORE X	INF10	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA
INIBITORE FATTORE XI	INF11	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA

INIBITORE FATTORE XIII	INF13	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA	
INIBITORE PROTEINA C	INPC	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA	
INIBIZIONE DELLE IgE SPECIFICHE	CAPIN	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
INSULINA	INS	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
INSULINA POST PRANDIALE	INSP	Siero	Bianco REF 362077	Effettuare il prelievo 2 ore dopo il pasto	
INTERLEUCHINA 1 BETA	IL1	Siero	Blu gel 3.5 mL REF 368966		
INTERLEUCHINA 10	IL10	Siero	Blu gel 3.5 mL REF 368966		
INTERLEUCHINA 12P70	IL12p70	Siero	Blu gel 3.5 mL REF 368966		
INTERLEUCHINA 6	IL6	Siero	Bianco REF 362077		
INTERLEUCHINA 8	IL8	Siero	Blu gel 3.5 mL REF 368966		
INTERLEUCHINA TNF ALFA	TNFA	Siero	Blu gel 3.5 mL REF 368966		
IODURI URINARI	UIOD	Urina del mattino	Giallo REF 455007		
ISAVUCONAZOLO	ISAVUC	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	

ISONIAZIDE	ISON	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
ITRACONAZOLO/OH - ITRACONAZOLO	ITRACO	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
KETONAZOLO	KETO	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
LACOSAMIDE	LACO	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
LAMOTRIGINA	LAMO	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
LATTATODEIDROGENASI	LDH	Siero	Bianco REF 362077		
LEVETIRACETAM	LEVE	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
LEVOFLOXACINA	LEVOF	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
LH	LH	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
LINEZOLID	LINEZ	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
LIPASI	LIP	Siero	Bianco REF 362077		SI
LIPASI LIQUIDO DA CAVITÀ	LIPALI	Liquido addominale	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
LIPASI SU CISTI PANCREATICA	LIP106	Liquido da cisti pancreatica	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		

LIPOPROTEINA (A)	LPA	Siero	Bianco REF 362077		
LIQUIDI BIOLOGICI ESAME CHIMICO	VERS	Liquido addominale, liquido dialisi liquido pericardico, liquido peritoneale, liquido pleurico, liquidi vari	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
LIQUIDO ADDOMINALE (CONTA ELEMENTI)	CEMO7	Liquido addominale	Lilla 3 mL EDTA REF 364662		
LIQUIDO DIALISI PERITONEALE (CONTA ELEMENTI)	CEMOLDP	Liquido dialisi peritoneale	Lilla 3 mL EDTA REF 364662		
LIQUIDO CISTI PANCREATICA - GLUCOSIO	GLIC106	Liquido da cisti pancreatica	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
LIQUIDO PERICARDICO (CONTA ELEMENTI)	CEMO74	Liquido pericardico	Lilla 3 mL EDTA REF 364662		
LIQUIDO PLEURICO (CONTA ELEMENTI)	CEMO9	Liquido pleurico	Lilla 3 mL EDTA REF 364662		
LISOZIMA SIERICO	ZIMA	Siero	Bianco REF 362077		
LISOZIMA URINA	ULIS	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
LITIO	LI	Siero	Bianco REF 362077	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
LOPINAVIR	LOPIN	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
MACROPROLATTINA	MPRL	Siero	Bianco REF 362077		

MAGNESIO	MG	Siero	Bianco REF 362077		SI
MAGNESIO URINA	MGU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
MANGANESE	MN	Plasma	Blu metal free (K2-EDTA) REF 368381	RICHIEDIBILE SOLTANTO MEDIANTE PERCORSI INTERNI DEDICATI	
MAPPA CROMOSOMICA SU SANGUE PERIFERICO	MAPPAN	Sangue in toto	Lilla 6 mL REF 367864 + Verde 4 ml REF 367869	Prenotabile CUP su PP OM o contattare Laboratorio (051/6478094)	
MARAVIROC	MARAV	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
MARCATORI PRECLAMPSIA - Tirosin-chinasico 1fms-simile (sFlt-1) - Fattore crescita placentare - Rapporto sFlt-1/PIGF	PREECLAMP	Siero	Bianco REF 362077		
MEROPENEM	MEROP	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
METADONE SU URINA	METADONE	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
METAEMOGLOBINA	METAHB	Sangue arterioso/venoso	Siringa eparinata	Agitare delicatamente dopo il prelievo	
METANEFRINE LIBERE PLASMATICHE	METAPL	Plasma	Giallo EDTA REF362073 in ghiaccio	Si consiglia di eseguire il prelievo di sangue venoso periferico in clinostatismo, dopo 30 minuti di riposo in <u>posizione supina</u> e dopo digiuno nelle 12 ore precedenti (è ammesso bere acqua).	
METANEFRINE URINA	METAU	Urina 24 ore + Acido cloridrico	Giallo REF 455007 + BIANCO	Prima di iniziare la raccolta di urine delle 24 ore versare nel contenitore di raccolta 25 mL di acido cloridrico 25%. Indicare diuresi delle 24 ore.	
METOTREXATE	METO	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y	DELY	Sangue in toto	Lilla 6 ml EDTA REF 367864	Prenotabile CUP su PP OM o contattare Laboratorio (051/6478094)	

MIOGLOBINA	MIOG	Siero	Verde Chiaro 4.5 mL CON GEL Eparina DI LITIO + REF 367376	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.
MIOSITI (immunoblot) - Anti Mi2 α - Anti Mi2 β - Anti TF1 γ - Anti MDA5 - Anti NXP2 - Anti SAE1 - Anti PM-Sci100 - Anti PM-Sci75 - Anti Jo1 - Anti SRP - Anti PL7 - Anti-PL12 - Anti EJ - Anti OJ - Anti Ro52	MIOSITI	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969	
MOLECOLE DI ADESIONE LEUCOCITARIA	0237	Sangue in toto	Nero REF 454245	SOLO SU CONSULENZA IMMUNOLOGICA Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico con il settore di esecuzione (051/3172726)
MUCOPOLISACCARIDI - U	UMUCOP	Urina del mattino	Giallo REF 455007	
NELFINAVIR	NELFI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco

NEURONALI - Anti amfifisina - Anti CV2 - Anti PNMA2 - Anti Ri - Anti Yo - Anti Hu - Anti Ricoverina - Anti SOX1 - Anti Titina - Anti Zic4 - Anti GAD65 - Anti Tr (DNER)	NEURO	Siero	Blu lunga 5 mL REF 368969		
NEVIRAPINE	NEVIR	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
NIPT- TEST PRENATALE NON INVASIVO	NIPT	Plasma	Bianco 8.5 mL REF 07785666001	Prenotabile presso il percorso nascita	
NSE - NEUR. SPEC. ENOLASE	NSE	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		
NT proBNP	NTBNP	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662		
OLANZAPINA	OLANZ	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
OMOCISTEINA	OMOCIS	Siero	Bianco REF 362077	Inviare il campione in portaprovette refrigerato	
OPPIACEI SU URINA	OPPIO	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH)	AMH	Siero	Bianco REF 362077		
OSMOLARITÀ PLASMATICA	OSM	Siero	Bianco REF 362077	Per richieste URGENTI utilizzare il codice PROFILO OSMC	

OSMOLARITÀ URINARIA	OSMU	Urina del mattino	Bianco REF 456085	Per richieste URGENTI utilizzare il codice PROFILO OSMUC	
OSSALATO - U	UOSS	Urina 24 ore + Acido cloridrico	Giallo REF 455007	Prima di iniziare la raccolta di urine delle 24 ore versare nel contenitore di raccolta 25 mL di acido cloridrico 25%. Indicare diuresi delle 24 ore.	
OSSICODONE	OXYU	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
OSTEOCALCINA	OSTEO	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968		
OXCARBAZEPINA (10-OH-CARBAZEPINA)	OHCARBA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
PARACETAMOLO	PARAC	Siero	Bianco REF 362077	Tossicologia: eseguire prelievo dopo 4 e 12 ore dalla presunta assunzione	
PARATORMONE	PTH	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
PARATORMONE SU AGOASPIRATO TIROIDEO	PTH21	Agoaspirato tiroideo	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
PARATORMONE SU LIQUIDO DI LAVAGGIO	PTH72	Liquido di lavaggio	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
PEPTIDE C	PEPC	Siero	Bianco REF 362077		
PEPTIDE C POST PRANDIALE	PEPCP	Siero	Bianco REF 362077	Effettuare il prelievo 2 ore dopo il pasto	
PERAMPANEL	PERA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
PFA-100 (Collagene/ADP)	PFA-100AD	Sangue in toto	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA.	

PFA-100 (Collagene/Epinefrina)	PFA-100EP	Sangue in toto	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA ANGIOLOGICA.	
PIASTRINE	PLT	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
PIPERACILLINA	PIPER	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
PIRAZINAMIDE	PIRAZ	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
PIRUVATOKINASI ERITROCITI	PKS	Siero	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
POSACONAZOLO	POSAC	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
POTASSIO	K	Siero	Bianco REF 362077		SI
POTASSIO URINA	KU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
PREALBUMINA	PREALB	Siero	Bianco REF 362077		
PREGABALIN	PREGA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
PRIMIDONE	PRIM	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
PROCALCITONINA	PCT	Siero	Bianco REF 362077		
PROGESTERONE	PROG	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	

PROLATTINA	PRL	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
PROPEPTIDE PROCOLLAGENE TIPO1 (PINP)	PINP	Siero	Ruggine REF 368968		
PROTEINA C (metodo coagulativo)	COAPC	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA	
PROTEINA C ANTIGENE	PCAG	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA	
PROTEINA C ANTICOAGULANTE	PROCINCO	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
PROTEINA C REATTIVA	PROTC	Siero	Bianco REF 362077		SI
PROTEINA C ULTRASENSIBILE	PROTCH	Siero	Bianco REF 362077		
PROTEINA GLA DI MATRICE (MGP)	MGP	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Solo per richieste da Ambulatori di: Nefrologia, Endocrinologia Pagotto e Endocrinologia Pediatrica Cassio	
PROTEINA S 100B	S100B	Siero	Ruggine REF 368968	Solo per richieste da Ambulatori di: Nefrologia, Endocrinologia Pagotto e Endocrinologia Pediatrica Cassio	
PROTEINA S 100B SU LIQUOR	S100BLIQ	Liquor	Ruggine REF 368968	Solo per richieste da Ambulatori di: Nefrologia, Endocrinologia Pagotto e Endocrinologia Pediatrica Cassio	
PROTEINA S ATTIVITA'	PSACT	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
PROTEINA S LIBERA	PROTS	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
PROTEINA S TOTALE	PSTAG	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048		

PROTEINE TOTALI	PROT	Siero	Bianco REF 362077		
PROTEINE URINA	PROTU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
PROTOPORFIRINA IX	PROTO	Siero	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
PSA	PSA	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
PSA REFLEX	PSAR	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
PSEUDOCOLINESTERASI	CHE	Siero	Bianco REF 362077	Richiedibile esclusivamente per pazienti degenti	
QUETIAPINA	QUETI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
RALTEGRAVIR	RALTE	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
RAME	CU	Siero	Bianco REF 362077		
RAME URINA	UCU	Urina 24 ore	Giallo REF 455007	Indicare diuresi	
RAPPORTO ALBUMINA/CREATININA URINA	0216	Urina del mattino	Bianco REF 456085		
IGE SPECIFICHE ALIMENTI	RASTAL	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
IGE SPECIFICHE FARMACI	RASTFA	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		

IGE SPECIFICHE INALANTI	RASTIN	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
IGE SPECIFICHE VELENI	RASTVE	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
RECETTORE LIBERO TRANSFERRINA	TRAREC	Siero	Bianco REF 362077		
RENINA ATTIVA	RENINA	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
RENINA ATTIVA CLINO	RENINAC	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Prelievo in clinostatismo = posizione supina per almeno 30 min. Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
RENINA ATTIVA ORTO	RENINAO	Plasma	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Prelievo in ortostatismo = posizione eretta da 30 min. (fermi o in cammino). Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	RESPRO	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire completamente la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
RETICOLOCITI	RET	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
RETINOL BINDING PROTEIN	RBP	Siero	Giallo REF 367955		
RICERCA ACANTOCITI	ACANTO	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo Richiedibile solo da percorsi specialistici. Richiedere insieme ad Emocromo	
RICERCA APLOTIPI HLA CORRELATI CON LA CELIACHIA	CELIA	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	

RICERCA BANDE OLIGOCLONALI - IgG (siero) - Albumina (siero) - IgG (liquor) - Albumina (liquor) - Indice di Link (rapporto quoziente IgG/quoziente Albumina) - Indice di barriera (rapporto Albumina liquor/Albumina siero)	RBOLIG	Liquor + Sangue	Contenitore pulito, no GEL, no ANTICOAGULANTE		
RICERCA EOSINOFILI NELLE FECI	EOFEC	Feci	Contenitore sterile trasparente con paletta e tappo a vite		
RICERCA EOSINOFILI TAMPONE NASALE	EOTANA	Citologia nasale (scrub)			
RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI	SOF	Feci	OC-Auto Sampling Bottle 3 2.0 mL		
RICERCA SCHISTOCITI	SCHIST	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
RICERCA X FRAGILE	FRAX	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Prenotabile CUP su PP OM o contattare Laboratorio (051/6478094)	
RIFAMPICINA	RIFAM	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
RILPIVIRINA	RILPI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
RISPERIDONE E 9-OH RISPERIDONE	RISPE	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
RITONAVIR	RITON	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
RIVAROXABAN	RIVA	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO PER DEGENTI	

ROTEM	ROTEMPOCT	Sangue in toto	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
RUFINAMIDE	RUFI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
SALICILATI	SAL	Siero	Bianco REF 362077	Eseguire prelievo dopo 1 - 3 ore dall'assunzione del farmaco. Tossicologia: prelievo estemporaneo e dopo 6 ore dalla presunta assunzione	
SAQUINAVIR	SAQUI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
SATURAZIONE TRANSFERRINA	SATRF	Siero	Bianco REF 362077	Da richiedere insieme a Ferro e Transferrina	
SELENIO	SE	Plasma	Blu metal free (K2-EDTA) REF 368381	RICHIEDIBILE SOLTANTO MEDIANTE PERCORSI SPECIALISTICI	
SEROTONINA PIASTRINICA (PLASMA ARRICCHITO IN PIASTRINE, PRP)	SEROP	Plasma arricch. In piastrine	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inoltro immediato in Crioplast (tenuto a 4° C).	
SEROTONINA (WB)	SEROTP	Sangue in toto	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inoltro immediato in Crioplast (tenuto a 4° C)	
SEROTONINA	SEROTU	Urina 24 ore + Acido cloridrico	Giallo REF 455007 + BIANCO	Prima di iniziare la raccolta di urine delle 24 ore versare nel contenitore di raccolta 25 mL di acido cloridrico 25%. Indicare diuresi delle 24 ore.	
SHBG - SEX HORMONE BINDING GLOBULIN	SHBG	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
SIERO AMILOIDE A (SAA)	SAA	Siero	Giallo REF 367955		
SIROLIMUS	SIR	Sangue in toto	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
SODIO	NA	Siero	Bianco REF 362077		SI

SODIO URINA	NAU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
SOTTOCLASSI IgG : IgG1, IgG2, IgG 3, IgG 4	SOTTOCLA	Siero	Giallo REF 367955		
STIRIPENTOLO	STIRI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
SULBACTAM	SULBA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
SULTIAME	SULTI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
TACROLIMUS	TACRO	Sangue in toto	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
TEICOPLANINA	TEICO	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
TEMPO DI PROTROMBINA (PT) (CORREZIONE con plasma normale)	PTCORR	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	
TEMPO DI PROTROMBINA (PT) (TEMPO DI QUICK)	QUICK	Plasma	Azzurro 3 ml REF 363048	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo	SI
TEMPO DI TROMBINA	TT	Plasma	Azzurro 9 ml REF 455322 VACUETTE	Riempire la provetta e agitarla delicatamente dopo il prelievo SOLO SU CONSULENZA	
TEOFILLINA	TEO	Siero	Bianco REF 362077	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
TEST DI INTOLLERANZA AL LATTOSIO	PRLCT	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
TEST DI CAPACITAZIONE	CAPACIT	Liquido seminale	Contenitore per LS REF BSC 740 BIOSIGMA	Solo presso PP Palagi AOSP. Si consiglia il prelievo per masturbazione dopo astinenza sessuale di 3 - 5 giorni. Consegnare il campione entro 1 h dal prelievo	

TEST DI FAGOCITOSI	FAGO	Plasma	Verde 4 mL NO GEL eparina di NA REF 367869	Previa CONSULENZA IMMUNOLOGICA Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico con il settore di esecuzione (051/3172726)	
TEST DI FARLEY (CONTA EMAZIE)	CONTEMA	Urina	Giallo REF 455007	Raccogliere le urine della seconda minzione del mattino, a distanza di 2 ore dalla precedente. Consegnare in Laboratorio nel minor tempo possibile (max 1 ora), previo accordo telefonico con il settore di esecuzione.	
TEST DI GRAVIDANZA	GX	Urina del mattino	Giallo REF 455007		
TEST DI VITALITÀ	VITALS	Liquido seminale	Contenitore per LS REF BSC 740 BIOSIGMA	Solo presso PP Palagi AOSP, prenotabile CUP o a pagamento. Richiedere anche ACITLS, FRUTLS e SPERMA. Si consiglia il prelievo per masturbazione dopo astinenza sessuale di 3 - 5 giorni. Consegnare il campione entro 1 h dal prelievo.	
TEST IMMUNOKNOW	KNOW	Plasma	Verde 4 mL NO GEL eparina di NA REF 367869	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Solo per percorsi specialistici	
TESTOSTERONE	TESTO	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
TIAGABINA	TIAGA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
TIGECICLINA	TIGEC	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
TIPIZZAZIONE CRIOGLOBULINE	0574	Siero	Tappo rosso 10 mL (NO GEL) REF 367896	Inoltro in Crioplast (tenuto a 37 °C)	
TIPIZZAZIONE EPN (Emoglobinuria Parossistica Notturna)	TIPEPN	Sangue in toto	Nero REF 454245	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. Inviare dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico con il settore di esecuzione (051/3172726)	
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	TIPLIN	Sangue in toto	Nero REF 454245	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA (Bilancio lifociti T)	ASSCD4	Sangue in toto	Nero REF 454245	Solo per percorsi specialistici	

TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA (PROFILO ALLARGATO)	IDK	Sangue in toto	Nero REF 454245	Solo per percorsi specialistici	
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA SU BAL	TIPBAL	Lavaggio broncoalveolare	Contenitore pulito, no GEL, ANTICOAGULANTE	Solo per percorsi specialistici	
TIREOGLOBULINA	TG	Siero	Bianco REF 362077		
TIREOGLOBULINA SU AGO ASPIRATO TIROIDEO	TG21	Agoaspirato tiroideo	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
TIREOGLOBULINA SU LIQUIDO DI LAVAGGIO	TG72	Liquido di lavaggio	Verde 6 mL NO GEL REF 368886		
TITOLO ANTI STREPTOLISINICO	TASL	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
TOPIRAMATO	TOPI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eeguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
TRANSFERRINA	TRF	Siero	Bianco REF 362077		
TRIGLICERIDI	TRIG	Siero	Bianco REF 362077		
TRIPTASI	TRYP	Siero	Rosso 8 mL (gel) REF 366468		
TROPONINA I HS	CTNI	Plasma	Verde Chiaro 4.5 mL CON GEL Eparina DI LITIO REF 367376	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo. L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	SI
TSH - ORM. TIREOTROPO	TSH	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	
TSH REFLEX	TSHR	Siero	Bianco REF 362077		

UREA	AZOT	Siero	Bianco REF 362077		SI
UREA ARTERIA	AZART	Siero	Bianco REF 362077	Per pazienti emodializzati	
UREA FINE DIALISI	AZFD	Siero	Bianco REF 362077	Per pazienti emodializzati	
UREA INIZIO DIALISI	AZID	Siero	Bianco REF 362077	Per pazienti emodializzati	
UREA URINA	AZOTU	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi	
UREA VENA	AZVEN	Siero	Bianco REF 362077	Per pazienti emodializzati	
UREA VENA PERIFERICA	AZVEP	Siero	Bianco REF 362077	Per pazienti emodializzati	
VANCOMICINA	VANCO	Siero	Bianco REF 362077	Valle: eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco. Picco: eseguire prelievo dopo 30 - 60 minuti dal termine di un'infusione di almeno 60 minuti	
VELOCITA' DI FILTRAZIONE GLOMERULARE (eGFR)	GFR	Siero	Bianco REF 362077	Calcolo derivato: da accettare contestualmente alla creatinine mia – Non accettabile singolarmente.	SI
VES	VES	Sangue in toto	Lilla 3 mL EDTA REF 364662	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo	
VIGABATRINA	VIGA	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco	
VITAMINA A (RETINOLO)	VITA	Plasma	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo Inoltro in Crioplast (tenuto a 4°C). Tenere al riparo dalla luce	
VITAMINA B12	B12	Siero	Bianco REF 362077	L'assunzione di biotina potrebbe interferire sul risultato dell'esame; se ne consiglia pertanto la sospensione nei 7 giorni precedenti al prelievo.	

VITAMINA B6	VITB6	Sangue in toto	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo Inoltro in Crioplast (tenuto a 4°C). Tenere al riparo dalla luce
VITAMINA D 1.25 OH	D125OH	Siero	Ruggine 5 ml REF 368968	Solo per percorsi specialistici Motivazioni alla richiesta di Vitamina D 1,25 OH: <ul style="list-style-type: none"> • Monitorare e modulare la somministrazione di calcitriolo in pazienti con Insufficienza renale cronica. • Iperparatiroidismo primitivo. • Diagnosi differenziale di Rachitismi dipendenti da disordini del metabolismo della Vitamina D25 OH o dei fosfati.
VITAMINA D 25 OH	D25OH	Siero	Bianco REF 362077	
VITAMINA E (ALFA-TOCOFEROLO)	VITE	Plasma	Giallo EDTA REF362073	Agitare delicatamente la provetta dopo il prelievo Inoltro in Crioplast (tenuto a 4°C). Tenere al riparo dalla luce
VORICONAZOLO	VORIC	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco
ZINCO	ZINCO	Siero	Bianco REF 362077	
ZINCO URINA	UZN	Urina 24 ore	Bianco REF 456085	Indicare diuresi
ZONISAMIDE	ZONI	Siero	Rosso 6 mL (no gel) REF 368815	Eseguire prelievo subito prima dell'assunzione del farmaco



RACCOMANDAZIONI GENERALI PER UN CORRETTO PRELIEVO - TEST EMOCOAGULATIVI

**1. Le etichette sulle provette devono essere integre, leggibili e ben posizionate.
Verificare sempre associazione paz – campione.**

2. Tutti i campioni devono essere inviati al laboratorio solo dopo la trasmissione della richiesta.

3. Esecuzione corretta del prelievo per gli esami di coagulazione e trattamento del campione

Provette BD Vacutainer® con Sodio Citrato in materiale plastico

Il volume di aspirazione sufficiente è ottenuto al raggiungimento o al superamento del livello di riempimento minimo.

*In ottemperanza alle linee guida: CIS INCC19 Doc. 2003, Doc. H1-A5, Vol. 23, N° 33

Indicatore di riempimento minimo visibile a 360°

Linea goffiata apposta sull'intera circonferenza della provetta

Rappresenta il volume minimo di sangue necessario all'esecuzione di un'analisi appropriata.

Provetta da 2,7 ml
13 x 75 mm
Aspirazione totale


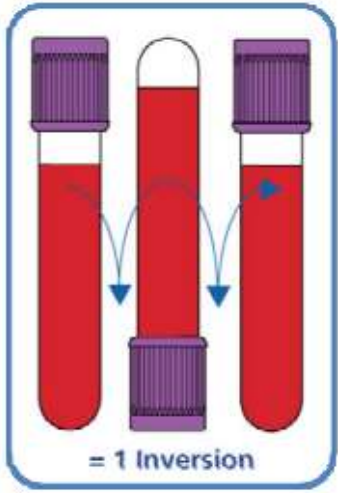









Provetta da 1,8 ml
13 x 75 mm
Aspirazione totale

Riduzione delle variabili preanalitiche nelle indagini emocoagulative

- Raccordare l'ago alla camicia per prelievo. Eseguire la venipuntura quindi introdurre la provetta all'interno della camicia e, come per iniettare, spingere la provetta verso il fondo dell'ago (cfr istruzioni per l'uso sulla confezione).
- Rivolgere il braccio del paziente verso il basso e mantenere la provetta con la chiusura rivolta verso l'alto rispetto al sito di prelievo.
- Rilasciare il laccio emostatico non appena il sangue inizia a fluire nella provetta. Non mantenere in posizione il laccio per più di un minuto.
- Attendere il tempo necessario affinché la provetta si riempia (esaurimento del vuoto e arresto del flusso ematico).
- L'indicatore di riempimento minimo indica il volume minimo di sangue necessario all'esecuzione di un'analisi appropriata.
- Nel caso si debba prelevare solo una provetta con citrato di sodio, impiegando un set per prelievo con ago epicarico, è necessario prelevare prima una provetta di scarto (senza additivo). È importante rimuovere l'aria presente nel raccordo del set di prelievo al fine di assicurare un corretto rapporto sangue/additivo.
- Nel caso il prelievo debba essere eseguito con una siringa, trasferire il sangue all'interno della provetta sottovuoto impiegando l'accessorio dedicato BD Vacutainer® Blood Transfer Device (codice 364810).
- Immediatamente al termine del prelievo, omogeneizzare il campione, per inversioni successive della provetta (3 o 4 volte). Non agitare con violenza.

ORDINE DELLE PROVETTE NEL PRELIEVO VENOSO

(Estratto dall'allegato 1 della Istruzione Operativa Aziendale Allegato 1 IO 26 AUSLBO)

Sequenza provetta	Colore tappo	quante volte capovolgere	come capovolgere
azzurra		3/4x	
rosso-marrone-rosa		5x	
giallo-bianco-blu		5x	
verde chiaro		8x	
verde		8x	
lilla		8x	
rosa +atg		8x	
grigio		8x	
giallo + atg		8x	
nero		8x	